

BACT/ALERT™



Nuevo Medio **FAN**

Mejor neutralización de antimicrobianos
Mejor recuperación de microorganismos
Tiempo de Resultado optimizado

Presentando el nuevo medio **FAN**tástico COMPROBADO:

☀ Neutralización de antimicrobianos más amplia

- Proporciona una mejor recuperación en presencia de antimicrobianos
- Se han neutralizado antimicrobianos de las siguientes familias con el nuevo medio FAN Plus: penicilina, tetraciclina, polienos, macrólidos, triazoles, equinocandinas, cefalosporinas, aminoglicósidos, fluoroquinolonas, lincosamidas, glicopéptidos, carbapenems*, y oxazolidinonas

☀ Mejor recuperación de microorganismos

- El medio reformulado proporciona un entorno que fomenta el crecimiento microbiano de bacterias y levaduras
- Crecimiento efectivo de organismos tanto en sangre como en líquidos estériles
- Pautas de crecimiento teniendo en cuenta la entrada retardada de botellas

☀ Tiempo de Detección Optimizado

- La efectiva neutralización de los antimicrobianos proporciona un mejor entorno para el crecimiento del microorganismo y su detección
- Algoritmo actualizado de los parámetros de la base de conocimiento

☀ Beneficios adicionales

- Tinciones de Gram más claras y fáciles de leer
- Botellas de policarbonato multi-capa antichoque seguras

*Sólo para FN Plus.



Comparación de Recuperación del nuevo medio Plus con el medio FAN actual (número de aislados)**

Grupo	BacT/ALERT FA Plus	BacT/ALERT FA
<i>Enterobacteriaceae</i>	31	30
Organismos exigentes	3	2
Hongos	15	17
Bacilos Gram-negativos no-fermentadores	8	10
<i>Staphylococcus</i>	81	75
<i>Streptococcus</i>	46	34

Grupo	BacT/ALERT FN Plus	BacT/ALERT FN
<i>Enterobacteriaceae</i>	27	23
Anaerobios	6	4
<i>Staphylococcus</i>	77	44
<i>Streptococcus</i>	30	30

** Resultados de ensayos clínicos

Información al SIL

Tipo de Botella	Abreviatura	Código Tipo	Prefijo código de barras	Longitud código de barras
BacT/ALERT® FA Plus	BFA+	BFA+	AR ZBAR	8 5-15
BacT/ALERT® FN Plus	BFN+	BFN+	NR ZBNR	8 5-15
BacT/ALERT® PF Plus	BPF+	BPF+	PR ZBPR	8 5-15BF

bioMérieux Colombia S.A.S.
Carrera 7
127-48 Of. 806 , Bogotá DC
Tel.: (571) 647 6011
Fax: (571) 647 5542

bioMérieux España, S.A.
Manuel Tovar, 45-47
28034 Madrid (España)
Tel.: (+34) 91 358 11 42
Fax: (+34) 91 358 08 40

www.biomerieux.com
www.biomerieux-diagnostics.com

BacT/ALERT® FA Plus Ref 410851
BacT/ALERT® FN Plus Ref 410852
BacT/ALERT® PF Plus Ref 410853

