



Abbott



ALERE DETERMINETM HIV-1/2 TEST

Detección rápida del VIH,
probado por millones, comprobado
por la práctica.



En 2017, más de 36 millones de personas en todo el mundo vivían con VIH¹.

El número de nuevas infecciones por VIH está aumentando en unos 50 países y las nuevas infecciones globales por el VIH sólo cayeron un 18% en los últimos siete años, de 2,2 millones en 2010 a 1,8 millones en 2017. Aunque casi la mitad el número de nuevas infecciones en comparación con el pico registrado en 1996 (3,4 millones), el declive no es lo suficientemente rápido para alcanzar el objetivo de menos de 500.000 personas para 2020².

Los programas de prevención y control de VIH en el mundo eligen la prueba de anticuerpos Alere Determine™ HIV-1/2 como una excelente opción para el tamizaje del VIH.

LA OPCIÓN GLOBAL

La comprobada confiabilidad de la prueba en el campo la convierte en un socio de confianza en la lucha contra el VIH. Alrededor del mundo, se han utilizado más de 400 millones de pruebas, lo que permite que millones de personas conozcan su estado.

El tamizaje rápido del VIH representa la base del compromiso asumido por Abbott para proporcionar tecnología avanzada, económica y accesible que contribuya a mejorar el control del paciente en el punto de atención.

Al proporcionar las herramientas necesarias para colaborar con el diagnóstico de pacientes con VIH y supervisar su estado, Abbott logra que los pacientes puedan encaminarse hacia una mejor salud.

LOS PORTADORES CRÓNICOS PRESENTAN UNA AMENAZA CONTINUA

Con un simple procedimiento de un paso para suero/plasma o un procedimiento de dos pasos para sangre total, la prueba Alere Determine HIV-1/2 es rápida y fácil de usar, y ofrece resultados claros y confiables en tan solo 15 minutos.

Diseñada teniendo en cuenta la simplicidad, solo es necesario recibir una capacitación mínima para comenzar y no es necesario contar con equipos, electricidad o agua potable.



SOPORTE Y SUMINISTRO SIN IGUAL


Todas las semanas, millones de pruebas salen de la planta de fabricación en Japón para trasladarse hasta los programas de VIH distribuidos por todo el mundo. La sólida y creciente capacidad de producción de Abbott garantiza que el suministro del producto no se vea comprometido, para que pueda tener las pruebas listas cuando las necesite.

Esta capacidad también ofrece la flexibilidad para responder rápidamente a la gran e impredecible demanda de los clientes; de esta manera, pueden seguir realizándose pruebas sin interrupción.

Durante más de una década de experiencia en la producción, se ha refinado la exactitud en la fabricación, lo que convierte a Alere Determine™ HIV-1/2 en una prueba de VIH confiable, rápida y garantizada en el mundo.

La perdurable presencia de la prueba en los programas globales de control y prevención del VIH ha generado una red cada vez más amplia de trabajadores capacitados en la atención de la salud: una fuerza de trabajo confiable y experimentada con la capacidad necesaria para generar resultados confiables.


Además, el impacto global de Abbott ofrece un alcance sin precedentes para brindar soporte al cliente, con lo cual, siempre hay ayuda a disposición.

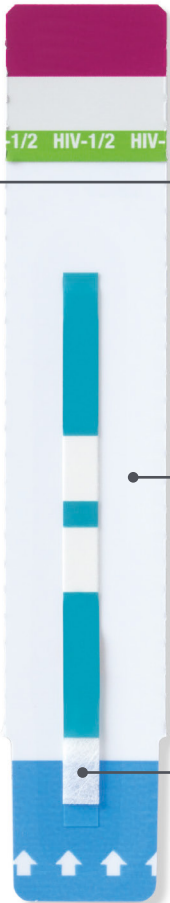

CUBIERTA QUE PROTEJE LA PRUEBA, FÁCIL DE RETIRAR



RESULTADO CLARO Y CONFIABLE EN TAN SOLO 15 MINUTOS

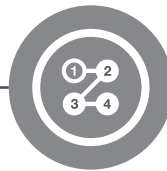

PRUEBA SENCILLA Y FÁCIL DE USAR

LA CALIDAD IMPORTA

Sabemos que la calidad es importante y que no es algo sencillo de lograr. La prueba Alere Determine™ HIV-1/2 se fabrica en Japón y se produce bajo los estándares de calidad más estrictos. Para nuestro equipo de fabricación y producción, la calidad es un estilo de vida y representa el compromiso para ofrecerle los productos que merece, en todo momento.


EL VALOR DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO SIMPLE Y CONFIABLE

Diseñada para el almacenamiento en una temperatura de 2 - 30° C, por lo cual no requiere refrigeración o transporte con cadena de frío, lo que le ofrece varias opciones de almacenamiento para adaptarse al ambiente.

El diseño inteligente del paquete hace que el almacenamiento y el envío sean más sencillos. Pequeña y liviana, la prueba Alere Determine™ HIV-1/2 le permite maximizar el valioso espacio de almacenamiento. Al no tener embalajes innecesarios, se reducen de manera significativa los costos de envío y, al mismo tiempo, se genera una menor cantidad de desechos con un mejor impacto sobre el medio ambiente.



100 PRUEBAS = 110g

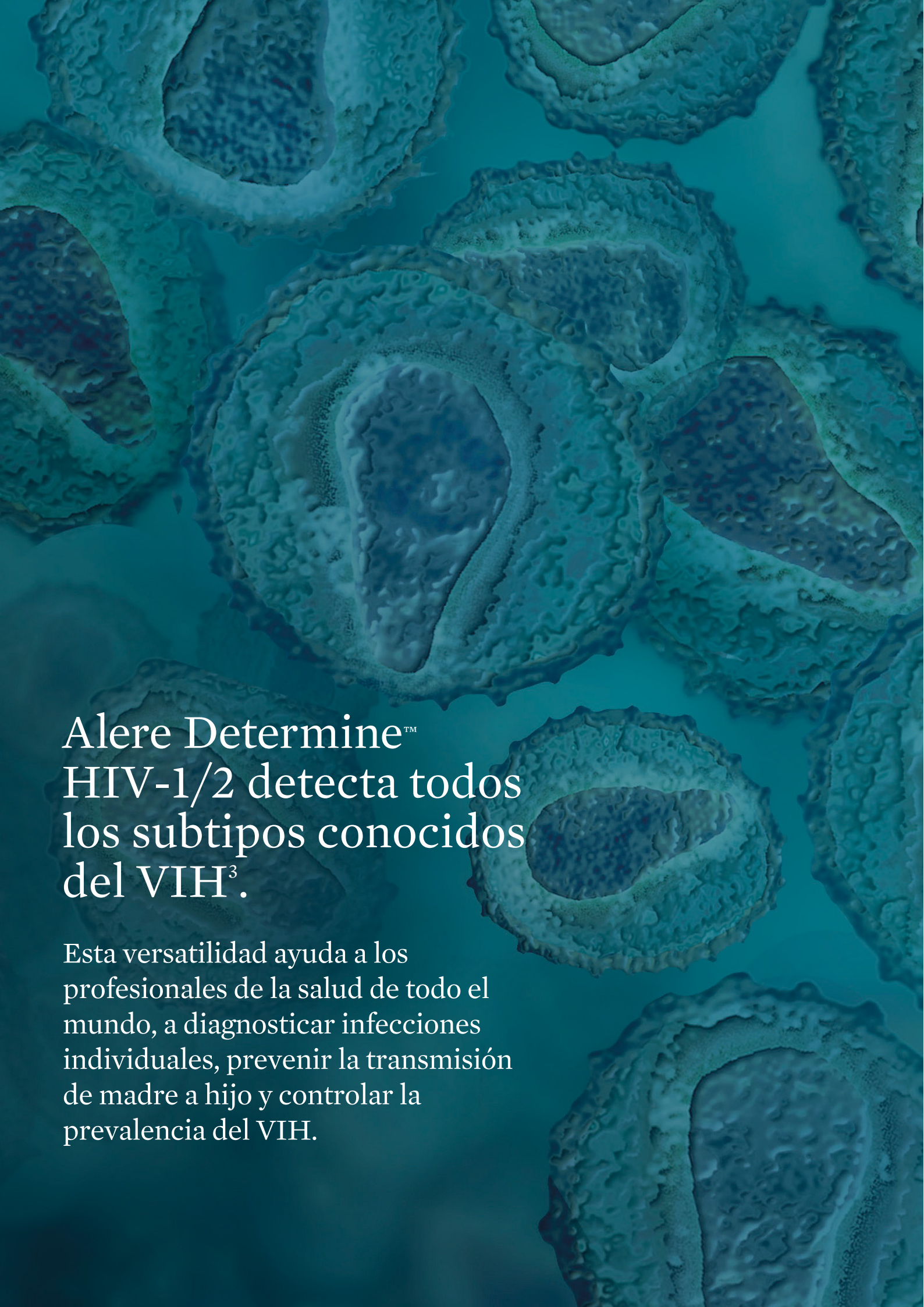
The background of the entire page is a microscopic image of cells, likely from a tissue sample, showing various cellular structures and nuclei. The image is overlaid with a semi-transparent teal color, which serves as a background for the text.

Alere Determine™
HIV-1/2 detecta todos
los subtipos conocidos
del VIH³.


Esta versatilidad ayuda a los profesionales de la salud de todo el mundo, a diagnosticar infecciones individuales, prevenir la transmisión de madre a hijo y controlar la prevalencia del VIH.

PROCEDIMIENTO³


- 1 Prepare la prueba**
Separe una tira de la derecha y quitele la lámina que la recubre.

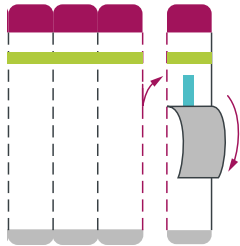


- 2 Agregue la muestra**
Plasma o suero. Agregue 50 µL de suero o plasma a la almohadilla para muestras y espere 15 minutos.

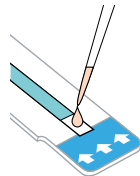


Punción capilar de sangre total. Agregue 50 µL de sangre total a la almohadilla de la muestra. Cuando se haya transferido toda la sangre del tubo capilar a la almohadilla de la muestra, agregue de inmediato una gota del tampón de detección a la almohadilla de la muestra.

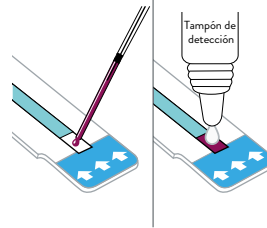

Venopunción de sangre total. Agregue 50 µL de sangre total a la almohadilla de la muestra, espere 1 minuto y agregue una gota del tampón de detección.

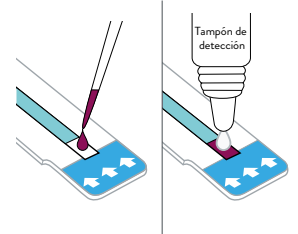

- 3 Lea el resultado**
Lea los resultados una vez que haya transcurrido entre 15 y 60 minutos, como máximo.

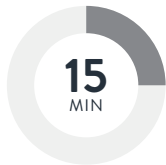


CONTROL



PACIENTE




POSITIVO

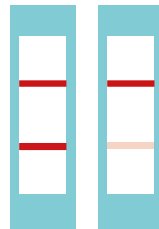

NEGATIVO



NO VÁLIDO

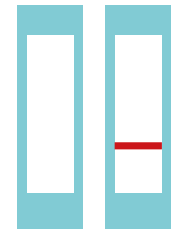

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TIPO DE INFORMACIÓN	DETALLE DEL PRODUCTO
Método	Flujo lateral
Tiempo de obtención de resultados	15 min
Condiciones de almacenamiento	2 - 30°C
Vida útil	18 meses
Tipo de muestra	Suero/Plasma/Sangre total mediante punción capilar o venopunción
Contenido del kit	20 o 100 unidades de pruebas, prospecto

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO
Alere Determine™ HIV-1/2 (x20 test)	7D2342
Alere Determine™ HIV-1/2 (x100 test)	7D2343
Alere Determine™ Chase Buffer	7D2243
Tubos capilares con EDTA (x100)	7D2222

* Para aplicar muestras de sangre mediante punción capilar o venopunción, solicite el tampón de detección (Chase Buffer). Este producto no está disponible en EE. UU. Producto disponible exclusivamente para su exportación a ciertos mercados.

COMERCIALIZADO POR:

Alere Colombia S.A
PBX Bogotá: 4824033
Línea Nacional: 01 8000 423 877

1. Estadísticas globales sobre el VIH 2017 - ONUSIDA. Disponible en: <https://unaids.org.br/estatisticas/>
2. Global AIDS Actualización 2018 - Un largo camino por recorrer. Disponible en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf
Visitada en 06/02/2019.
3. Para mayor información consulte el instructivo de uso.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE LOCAL O VISITE ABBOTT.COM/POCT

© 2019 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners. Any photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photos is a model. 120005194-01 05/19

