



MICROBIOLOGÍA INNOVADORA

LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART-
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA

VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®



VITEK® MS PRIME

Folletos de reactivos

PIONEERING DIAGNOSTICS

LISTA DE PRODUCTOS*



**VITEK® MS-DS
TARGET SLIDES**
REF 410893

**VITEK® MS
SMARTCALIBRANT**
REF 423710

VITEK® MS-CHCA MATRIX
REF 411071

VITEK® MS-FA FORMIC ACID
REF 411072

VITEK® PICKME™
REF 423546 - REF 423551

VITEK® MS MOULD REAGENT KIT
REF 415680

**VITEK® MS MYCOBACTERIUM/
NOCARDIA REAGENT KIT**
REF 415659 - REF 421564 - REF 4704630

LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART-
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA

VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®

* Todos los reactivos y accesorios han sido desarrollados y validados específicamente para su uso en VITEK® MS y VITEK® MS PRIME.

REACTIVOS VITEK® MS PRIME

Control de calidad
de los lotes de
reactivos para
cumplir los
criterios de
eficacia

Certificados de
control de
calidad
disponibles en
línea

LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART-
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA


VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®



VITEK® MS-DS LÁMINAS DE MONTAJE

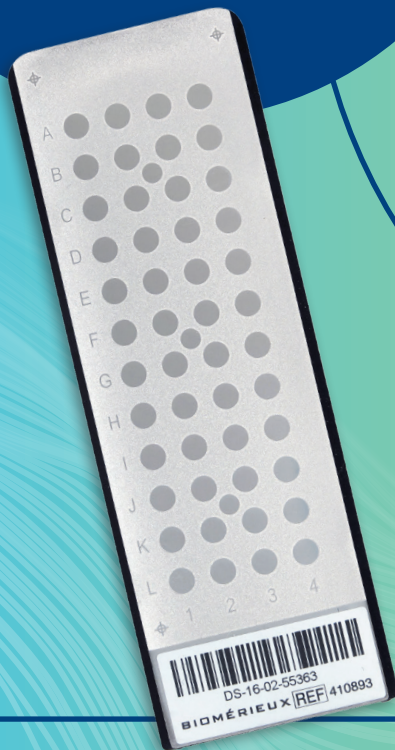

**Láminas desechables con
identificador de código de barras único
para la preparación de 48 muestras**

- No es necesario limpiar las láminas
- Reduce los errores potenciales
asegurando la trazabilidad a lo largo del
proceso

**VITEK® MS-DS
KIT DE LÁMINAS DE MONTAJE
REF 410893**

8 x 4 láminas de montaje
48 pozos por lámina

**AHORRO DE TIEMPO
Y TRANQUILIDAD**

LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART-
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA

VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®

VITEK® MS SMARTCALIBRANT

VITEK® MS SMARTCALIBRANT
aplica *E.coli* directamente en el pozo de
calibración y permite una calibración
diaria, sencilla y racionalizada

→ Listo para usar sin necesidad de preparación

**AHORRO DE TIEMPO Y
ESTANDARIZACIÓN**

**VITEK® MS
SMARTCALIBRANT**
REF 423710

VITEK® MS SMARTCALIBRANT =
5 X 0.2 mL



LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA

VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®

MATRIZ VITEK® MS-CHCA



La matriz aplicada directamente a los pozos de la muestra permite la ionización mediante la adsorción de energía del láser MS y la desorción de los microorganismos

→ Listo para usar sin necesidad de preparación

**MATRIZ VITEK®
MS-CHCA
REF 411071**

VITEK® MS-CHCA = 5 X 0.5 mL

**AHORRO DE TIEMPO Y
ESTANDARIZACIÓN**

LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART-
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA

VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®

VITEK® MS-FA



El Ácido Fórmico aplicado directamente en el pozo de los depósitos de levadura ayuda a romper la pared celular y extraer proteínas

→ Listo para usar sin necesidad de dilución

VITEK® MS-FA

REF 411072

VITEK® MS-FA = 5 X 0.5 mL

**AHORRO DE TIEMPO Y
ESTANDARIZACIÓN**

LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART-
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA

VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®

VITEK® PICKME™

Innovadora herramienta de preparación de muestras para tomar y aplicar colonias en las láminas de VITEK® MS

- Preparación de muestra sencilla y estandarizada
- Reducción en la repetición de muestras



VITEK® PICKME™ PEN

REF 423546 (1 pluma)

VITEK® PICKME™ NIBS

REF 423551 (18 cajas de 96 puntas)
Para un solo uso

AHORRO DE TIEMPO Y FACILIDAD DE USO

LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART-
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA

VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®

KIT DE MOHOS VITEK® MS

Kit todo incluido que contiene los reactivos y consumibles necesarios para realizar la inactivación y extracción de proteínas para la identificación de mohos

→ Protocolo validado y reproducible



VITEK® MS MOULD KIT

REF 415680 (100 pruebas por kit)

Etanol (70%) (4 x 25 mL)
Ácido fórmico (70%) (4 x 1 mL)
Acetonitrilo (100%) (4 x 1 mL)
Tubos de fondo redondo de 2 mL (2 x 50 unidades)

**SIMPLE Y
EFECTIVO**

LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA

VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®

KIT MYCOBACTERIUM / NOCARDIA VITEK® MS

Kit todo incluido que contiene los reactivos y consumibles necesarios para realizar la inactivación y extracción de proteínas para la identificación de Mycobacterium y Nocardia a partir de medios sólidos

- Existe un kit complementario disponible para procesar muestras líquidas
- Protocolo validado y reproducible
- El proceso de inactivación permite manipular las muestras fuera del nivel 3 de bioseguridad



**RÁPIDO Y
PRECISO**

1/2

LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART-
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA

VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®

KIT MYCOBACTERIUM / NOCARDIA VITEK® MS

VITEK® MS MYCOBACTERIUM/ NOCARDIA KITS (SÓLIDO Y LÍQUIDO) 100 pruebas por kit

Nº de referencia del kit:
REF 4704630



REF 415659

VITEK® MS MYCOBACTERIUM/
NOCARDIA Kit para el
procesamiento de cultivos sólidos
Etanol (70%) (2 x 25 mL)
Ácido fórmico (70%) (4 x 0,5 mL)
Acetonitrilo (100%) (4 x 0,5 mL)
Tubos de fondo redondo de 2 mL (2 x 50 unidades)
Tubos con perlas de vidrio (2 x 50 unidades)

REF 421564

VITEK® MS LIQUID
MYCO SUPPLEMENTAL KIT para el
procesamiento de muestras líquidas*.
Tubos de microcentrifuga de 5 mL**
(2 x 50 unidades)
250 almohadillas absorbentes
con reverso protector (toallitas)

*Para procesar muestras líquidas se requieren REF 415659 y REF 421564. ** Incluido con REF 421564 y REF 470630.



LÁMINAS
VITEK®
MS-DS

CEPA SMART-
CALIBRANT
VITEK® MS

MATRIZ
VITEK®
MS-CHCA

ÁCIDO
FÓRMICO
VITEK®
MS-FA

VITEK®
PICKME™

KIT DE
MOHOS
VITEK®
MS

REACTIVOS
MYCOBAC-
TERIUM/
NOCARDIA
VITEK®